

「コーワ SL-19 専用アプリ」(以下、本アプリ)は、ポータブルスリットランプ コーワ SL-19 のカメラタイプ(以下、SL-19 plus)にて撮影された画像を取得・表示・記録するためのソフトウェアです。本アプリをご使用する際は、SL-19 plus を併せてお買い求めください。SL-19 plus の使用方法・注意事項については、同機器の取扱説明書などをご参照ください。


本書では、本アプリを使用するために必要な iPad mobile digital device の設定方法を記載しています。
本アプリの使用方法などについては、取扱説明書「基本操作編」「その他の操作方法編」をご参照ください。

本書に記載の手順を実施する前に、「コーワ SL-19 専用アプリ 取扱説明書 設定編」の手順を終えてください。



「取扱説明書 設定編」にしたがい作業を行った後、**本書にしたがって必ず iPad の設定を行ってください。**

iPad の設定 プライベート Wi-Fi アドレスを『OFF』に設定

- ① 「コーワ SL-19 専用アプリ 取扱説明書 基本編」 ① 「起動から撮影まで」の作業を行ってください。
- ② iPad ホーム画面で  をタップして「設定」App を開きます。
- ③ 「Wi-Fi」をタップします。
- ④ 接続している SL-19 plus の SSID 名の横にある詳細情報ボタン  をタップします。
- ⑤ 次の画面で「プライベート Wi-Fi アドレス」の  をタップします。

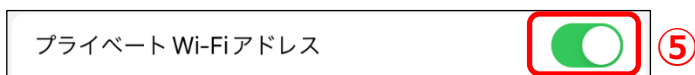

- ⑥ ポップアップが出た場合は「続ける」を選択してください。
- ⑦ 「プライベート Wi-Fi アドレス」がオフになっていることを確認してください。

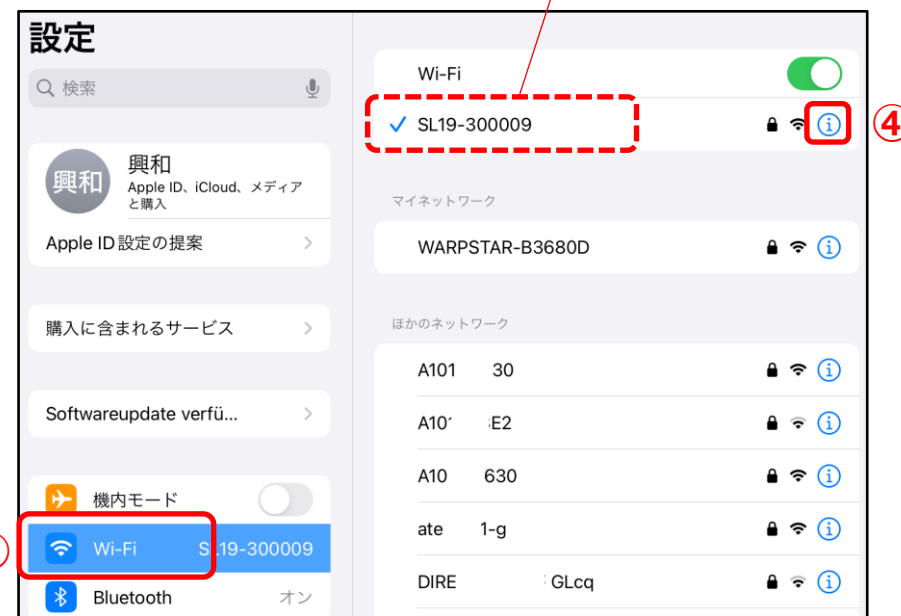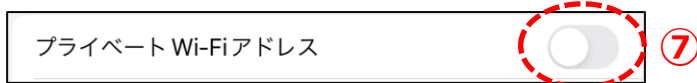

※ 複数台の iPad を交代で SL-19 plus に接続している場合は、全ての iPad で プライベート Wi-Fi アドレスをオフに設定してください。

※ 手順 ④で、SL-19 plus の SSID 以外の設定は変更しないでください。変更するとセキュリティに影響が出る場合があります。



販売元 **興和株式会社** 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町 3-4-14

iPad および iPadOS は、Apple Inc. の商標です。

© 2024 Kowa Company, Ltd. All rights reserved.
SL-AP192 U4 V1.1J 241129 KW
Printed in Japan